

VRAAG EN ANTWOORD

Vraag:
Hoe werkt de Easy Home Test Zwangerschap?
Antwoord:
Indien een vrouw zwanger wordt, zal haar lichaam het hCG hormoon (humaan Chorion Gonadotrofine) produceren. Dit hormoon wordt uitgescheiden in de urine, waarin de concentratie in de loop van de tijd verhoogt. De Easy Home Test Zwangerschap detecteert het zwangerschapshormoon in urine.

Vraag:
Op welk tijdstip kan ik de test het best uitvoeren?
Antwoord:
U kunt de test op elk moment van de dag uitvoeren; maar in het geval van een zeer vroege zwangerschap (8 tot 10 dagen na bevruchting) kan men het best een monster nemen van de eerste ochtendurine.

Vraag:
Wanneer kan ik het best testen?
Antwoord:
Vanaf het moment dat de menstruatie één dag te laat is.

Vraag:
Zal de test beïnvloed worden door de hoeveelheid vloeistof die wordt gedronken?
Antwoord:
Door veel vloeistof op te nemen wordt het urinemonster verdund en de detectie van het zwangerschapshormoon moeilijker. Een normale vloeistofopname is aangeraden.

Vraag:
Wat als ik een vermoeden heb dat de resultaten foutief zijn?
Antwoord:
Indien het onduidelijk is of er een lijn aanwezig is in het testvenster, is het aanbevolen om de test na 2-3 dagen te herhalen met een nieuwe Easy Home Test en een nieuw urinemonster. Indien u de aanwijzingen goed volgt, verkrijgt u betrouwbare resultaten. Bepaalde medicijnen die hCG bevatten of worden gebruikt in combinatie met hCG (zoals Pregnyl, Porfasi, Pergonal) en zeldzame aandoeningen kunnen foutief een positief resultaat geven.

Alcohol, analgetica, antibiotica, anticonceptiva, hormoontherapieën gebaseerd op clomifeen citraat (zoals Clomid, Serophen) of pijnstillers beïnvloeden het testresultaat niet. De test kan een foutief positieve uitslag geven indien u recent, minder dan 8 weken geleden, een miskraam of abortus had of bevallen bent. De test zou in deze gevallen hCG van de vorige zwangerschap kunnen detecteren.

Vraag:
Ik heb het monsteropnamegebied langer dan 10 seconden in de urine gehouden. Zijn de resultaten dan nog correct?
Antwoord:
Ja, enkele seconden langer zal geen effect hebben op de resultaten.

Vraag:
Ik heb het monsteropnamegebied korter dan 5 seconden in de urine gehouden. Zijn de resultaten dan nog correct?
Antwoord:
Nee, want er is mogelijk onvoldoende urine opgenomen.

Vraag:
Wat moet ik doen als de testlijn donkerder is dan de controlelijn of als de testlijn lichter is dan de controlelijn?
Antwoord:
Verschillen in de kleur van de lijnen hebben geen invloed op de uitslag van de test. Indien een roze/paarse lijn aanwezig is in beide vensters is de test positief.

Vraag:
Als de uitslag positief is, wat moet ik dan doen?
Antwoord:
Indien het resultaat positief is, ga dan naar de huisarts om de zwangerschap te laten bevestigen en de volgende stappen te bespreken. Vroege prenatale zorg is belangrijk voor uw en uw baby's gezondheid.

Vraag:
Als de uitslag negatief is, wat moet ik dan doen?
Antwoord:
Indien het resultaat negatief is, bevat uw urine weinig hCG (de test meet hCG-waarden vanaf 10 mIU/ml) en bent u vermoedelijk niet zwanger.

Indien uw menstruatie na een week niet gestart is, herhaal de test. Indien u nog steeds een negatief resultaat hebt en uw menstruatie blijft uit, raadpleeg dan uw huisarts. Dit uitblijven kan andere oorzaken hebben.

Vraag:
Wat als ik minder dan 5 minuten wacht voor het aflezen van de test?
Antwoord:
Indien u de test afleest voor 5 minuten, kan het zijn dat u de test niet genoeg tijd gaf en dat het resultaat niet correct is. Vanaf het moment dat u een lijn in het controlevenster ziet, is de test afgelopen en kan u de resultaten aflezen. INTERPRETEER GEEN resultaten verkregen 10 minuten nadat het monsteropnamegebied in contact is gekomen met urine.

Verklaring van de gebruikte symbolen op de verpakking:

 VERVALDATUM

 LOT NUMMER

 0344 CE KEURMERK (IVD)

 FABRIKANT

 IN VITRO DIAGNOSTICUM

Inhoud van deze test:
1 aluminium zakje met testplaatje
“IMP HCG Test”
1 bijsluiter

SNELLE, MAKKELIJKE EN BETROUWBARE ZELFTEST



Imhotep Medical Products B.V.
Jonckherenhof 7
6581 GC MALDEN
NEDERLAND
www.easyhometest.eu

Heeft u vragen? Bel onze servicelijn: 024-365 63 05

Zodra de test is uitgevoerd, kan men alle gebruikte spullen weer terugdoen in de lege folieverpakking en vervolgens in het originele doosje. Daarna wegdoen bij het huisvuil.

Bijsluiter versie: 5 juni 2012

 0344

ZWANGERSCHAP
BIJSLUITER

BELANGRIJK
Lees voor gebruik van de Easy Home Test® deze bijsluiter goed door.

INLEIDING

De Easy Home Test Zwangerschap is een zelftest voor het aantonen van het zwangerschapshormoon hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) in urine. Een verhoging van het zwangerschapshormoon kan betekenen dat er een zwangerschap plaatsvindt.


INHOUD

- 1 testplaatje Easy Home Test Zwangerschap
- 1 bijsluiter

Het testplaatje is verpakt in een gesloten aluminium zakje met daarin een vochtabsorberend middel. Het testplaatje moet bewaard blijven in dit gesloten zakje tot net voor gebruik. Het zakje met vochtabsorberend middel is niet nodig voor het uitvoeren van de test.

TESTPRINCIPE

Easy Home Test Zwangerschap is een kwalitatieve sneltest voor het aantonen van het zwangerschapshormoon hCG (humaan Chorion Gonadotrofine) in urine. Al na 5 minuten is het mogelijk om een hCG-concentratie van 10 mIU/ml, of hoger, op te sporen. Bij afwezigheid van hCG verschijnt er geen gekleurde lijn in het testvenster, maar wel één lijn in het controlevenster.

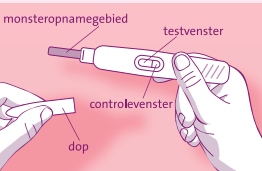

WAARSCHUWINGEN

1. Deze test is enkel ontwikkeld voor in vitro diagnostisch gebruik. Uitsluitend voor extern gebruik. NIET INSLUKKEN.
2. Lees voor gebruik van de test deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. De test is enkel betrouwbaar indien de gebruiksaanwijzing nauwkeurig gevolgd wordt.
3. Bewaren tussen +4°C en +30°C. Niet invriezen. Bescherm tegen zonlicht, vochtigheid en hitte.
4. Niet gebruiken na de vervaldatum (vermeld op de doos en het aluminium zakje) of wanneer het aluminium zakje beschadigd is. Breng de beschadigde test terug naar de winkel waar deze gekocht is.
5. De Easy Home Test is niet geschikt voor hergebruik.
6. Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEBRUIKSAANWIJZING

STAP 1

Open het aluminium zakje en haal er de Easy Home Test Zwangerschap uit. Gooi het zakje met vochtabsorberend middel weg.

STAP 2

Verwijder de dop van de Easy Home Test en houd het monsteropnamegebied rechtstreeks onder de urinestraal voor 5 tot 10 seconden. Let op dat de urinestraal niet voorbij de pijl op de teststrip vloeit.



Indien gewenst, kan het urinemonster opgevangen worden in een gereinigde droge beker (niet meegeleverd). Houd het monsteropnamegebied minimaal 10 seconden in de urine, zodat het volledig doordrenkt is.

Indien de mogelijke zwangerschap nog in een heel vroeg stadium is, wordt gebruik van de eerste ochtendurine aanbevolen.

STAP 3


Plaats de dop terug op de Easy Home Test Zwangerschap.

STAP 4

Leg de Easy Home Test op een droge en vlakke ondergrond met het afleesvenster naar boven. Lees na 5 minuten het resultaat af. Wacht niet langer dan 10 minuten.

AFLEZEN VAN HET RESULTAAT


Wacht ongeveer 5 minuten met het aflezen van het resultaat. Binnen 5 minuten zal er een gekleurde lijn verschijnen in het controlevenster (kleinste venster). Op het moment dat deze lijn verschijnt, mag u de resultaten aflezen.

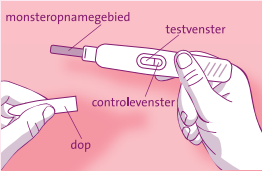

POSITIEF RESULTAAT:


Twee roze/paarse lijnen verschijnen: één in het testvenster en één in het controlevenster. De uitslag is positief, er is een zwangerschap. Ga naar de huisarts voor een verdere opvolging van uw zwangerschap.

Attentie: één lijn kan donkerder zijn dan de ander. Zelfs indien de lijnen slechts zwak gekleurd zijn, is de test positief. De kleurintensiteit van de uitslaglijnen kan verschillen, omdat de concentratie hCG in de verschillende fases van de zwangerschap verschillend is.

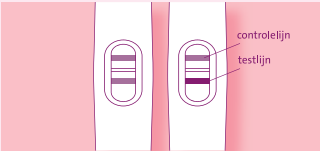


NEGATIEF RESULTAAT:

Enkel in het controlevenster (kleinste venster) verschijnt er een roze/paarse lijn en geen lijn in het testvenster (grootste venster). De uitslag is negatief, er is geen zwangerschap.

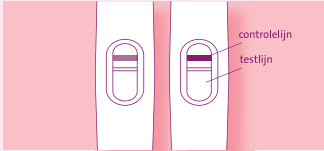

ONGELDIG RESULTAAT:

Indien er geen Controlelijn verschijnt, is de test ongeldig en kan de test niet worden geïnterpreteerd. In dit geval kunt u het best de test herhalen met een nieuwe Easy Home Test en een nieuw urinemonster.

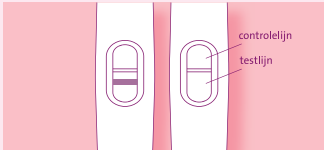

ONDERZOEKSRESULTATEN

De Easy Home Test Zwangerschap detecteert hCG in de urine van zwangere vrouwen bij concentraties van 10 mIU/ml en hoger.

In een studie hebben 52 vrouwen de test in een huiselijke omgeving gebruikt. Allen verkregen een correct resultaat met de test.

In een andere studie in een professionele omgeving zijn 93 monsters van zwangere vrouwen getest door professionals. Tweënnegentig van de monsters waren positief met de test. In dezelfde studie zijn ook 22 urinemonsters getest van niet zwangere vrouwen. Allen verkregen een negatief resultaat met de Easy Home Test Zwangerschap.